



## Steril+++ Kvartsi-sterilisaattori

### Tutustu käyttöohjeisiin huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

- Tutustu käyttö ja turvallisuusohjeisiin ennen laitteen käyttöä. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen ohjeiden vastaisesta käytöstä.
- Tästä ohjeesta löydät tarvittavat tiedot laitteen käyttöönotosta, käytöstä ja puhdistamisesta.
- Varmista laitteen ohjeiden mukainen käyttö, säilytä tämä tiedote.
- Älä käytä laitetta ohjeiden vastaisesti.
- Paketin avaamisen jälkeen, tarkista laitteen kunto mahdollisten vaurioiden varalta. Älä jätä pakettia lasten ulottuville.
- Käsittele laitetta varoen. Jos laite kolahtaa kovaa tai putoaa, tarkistuta laitteen kunto ammattilaisella ennen seuraavaa käyttöä.
- Noudata seuraavia ohjeita kaikkien sähkölaitteiden käsittelyssä:
  - älä koske laitteeseen märillä tai kosteilla käsillä
  - älä käsittele laitetta paljain jaloin
  - älä koskaan jätä laitetta lasten ulottuville
- Kytke laite virtapistokkeeseen vain, jos virransyöttö vastaa laitteen vaatimuksia.
- Älä koskaan käytä kulunutta tai vaurioitunutta virtajohtoa. Jos virtajohto vaurioituu, huollata laite ammattilaisella.
- Sammuta laite aina, kun se ei ole käytössä. Säilytä lasten ulottumattomissa.
- Sammuta ja irrota virtapistoke ennen laitteen puhdistamista.
- Mahdollisen vian ilmetessä, ota yhteyttä laitteen maahantuojaan, Sky Group Finland Oy.
- Älä anna laitetta lasten käytettäväksi. Älä jätä laitetta lasten ulottuville.

### **Erityistiedot:**

- Laite on valmistettu laadukkaista materiaaleista noudattaen hyvää työtapaa. Laite noudattaa 2006/95/EC ja 2004/108/EC direktiivejä.
- Älä altista laitetta herkästi syttyville kaasuille tai alkoholeille.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan metallisten instrumenttien ja työvälineiden sterilointiin.
- VAROITUS: Älä käytä laitetta ilman kvartsipalloja, älä täytä astiaa vedellä.

## Käyttö:

- Lisää kvartsipallot laitteen mukana tulevaan metalliastiaan ja käynnistä laite virtakytkimestä
- Aseta termostaatti maksimiin ja lämmitä 45 minuuttia, lämmityksen jälkeen aseta termostaatti kohtaan 16 optimaalisen sterilointitehon ylläpitämiseksi
- Pese steriloitavat välineet huolellisesti ja varmista, että instrumentit ovat puhtaita ja kuivia
- Aseta puhtaat instrumentit sterilointiastiaan kauas toisistaan, älä täytä sterilisaattoria instrumenteilla ylikuumentumisvaaran vuoksi
- Steriloi instrumentteja 20 – 30 sekuntia, erittäin kuuma lämpötila steriloi välineet nopeasti ja hellävaraisesti
- Käytä lämmönkestäviä käsineitä tai apuvälinettä poistaessasi kuumia välineitä sterilisaattorista
- Säilytä steriloidut instrumentit asianmukaisesti pakattuina
- Kvartsipallojen lämmönjohtokyky heikentyy hiljalleen ajan kanssa, vaihda kvartsipallot uusiin noin 4 kuukauden välein

## Tekniset tiedot:

- Malli: Kvartsi-sterilisaattori
- Virta: 220-230 V, 50/60 Hz
- Teho: 100 W
- Paino 0.87 kg
- Koko: 180 x 176 x 176 mm

## Puhdistaminen:

- Irrota virtajohto ennen laitteen puhdistamista
- Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista
- Älä käytä liuottimia tai voimakkaita puhdistusaineita laitteen rungon puhdistamiseen.
- Pyyhi laitteen runko kostealla liinalla.



Symboli merkitsee, ettei laitetta saa heittää talousjätteisiin. Toimita laite sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. Oikeaoppinen käsittely edesauttaa ympäristön ja ihmisterveyden suojelua ja välttää vahinkoa ympäristölle. Käännä tarkempia tietoja varten paikallisen kunnan viranomaisten puoleen.

## Maahantuoja:

Sky Group Finland Oy  
Helsinki, Y: 1780012-7  
+358 (0)9 72 77 250  
[info@skygroup.fi](mailto:info@skygroup.fi)  
[www.skygroup.fi](http://www.skygroup.fi)